




**Jak používat Váš ScanBox<sup>pro</sup>**

# Objevte Váš ScanBox pro


## Držák telefonu

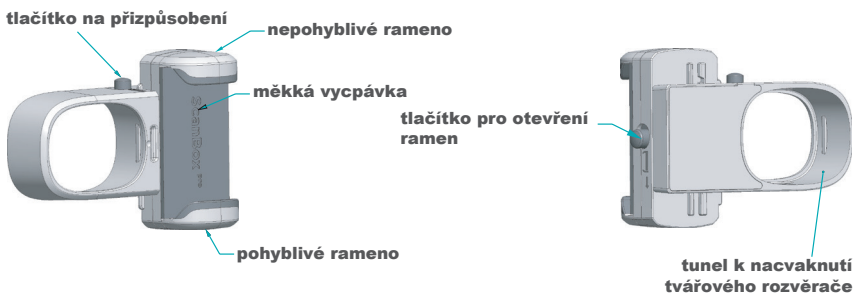


## Trubice tvářového rozvěrače




**Přední pohled na ScanBox pro s vloženým mobilním telefonem.**

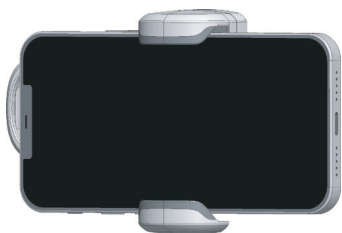

**Zadní pohled na ScanBox pro s vloženým mobilním telefonem.**

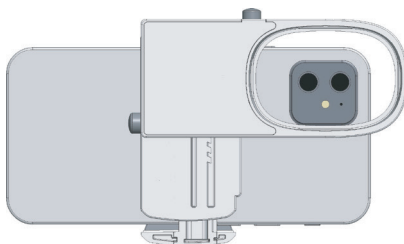

# 1 / Spusťte aplikaci DentalMonitoring.

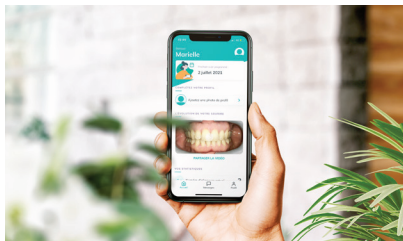

**Před každým scanováním si umyjte ruce mýdlem a vodou.**

*Postavte se před zrcadlo, spusťte aplikaci dental monitoring a zapněte zvuk na svém mobilním telefonu.*

# 2 / Použijte rozvěrač tváří vhodné velikosti.

## ANO

*Vždy používejte retractor, který sedí Vaším ústům. S výběrem vám pomůže Váš lékař.*

## NE

*Nikdy nepoužívejte retractor, který je moc malý pro Vaše usta- zuby by nešly vidět.*

*Nikdy nepoužívejte retractor, který je příliš velký pro Vaše usta - scanování by mohlo být bolestivé.*

# 3 / Umístěte svůj chytrý telefon do držáku.



*Přizpůsobte si pozici mobilního telefonu, stisknutím tlačítka a pohybem nahoru nebo dolů, tak aby čočka fotoaparátu směřovala ve střed trubice.*

**NE** *Nevkládejte mobilní telefon do držáku naopak.*

## ANO

*Chytněte držák mobilního telefonu tak, ať ramena směřují k Vám.*

*Otevřete ramena stisknutím bočního tlačítka a umístěte svůj mobilní telefon (bez obalu) do držáku, tak aby čočka fotoaparátu směřovala do okýnka a displej směrem k Vám.*

*Zajistěte mobilní telefon stisknutím ramen.*



## 4 Spojte trubici tvářového rozvěrače s držákem telefonu.

### ANO

*Připevněte tvářový rozvěrač k držáku telefonu. Uslyšíte cvaknutí.*

### NE

*Použijte jen jeden tvářový rozvěrač.*

*Nepokoušejte se spojit tvářový rozvěrač do držáku mobilu, špatnou stranou.*



## 5 Vložte tvářový rozvěrač do úst.



### ANO

*Vložte rozvěrač do úst. Vaše zuby i dásně by měly být viditelné na obrazovce mobilního telefonu.*



### NE

*Nekousejte do rozvěrače. Rozvěrač by měl být umístěn mezi zuby a rty.*

**Pokud máte jakékoli dotazy týkající se DentalMonitoring nebo procesu skenování, neváhejte se obrátit na svého specialistu srze aplikaci DentalMonitoring.!**

## 6 Dvojitým poklepáním na obrazovku spustíte skenování.



### ANO

Při skenování dělejte táhlé pohyby - od ucha k uchu- abyste naskenovali všechny zuby, včetně těch úplně vzadu v ústech.

Zůstaňte na místě, pohybuje pouze ScanBoxem a mobilní telefonem. Neotáčejte hlavou.

Následujte trasu a rychlost šipky na obrazovce, pro zajištění optimálních snímků.

### NE

Nevystrkujte jazyk před zuby. Vydechněte pouze nosem, zabráníte tak zamíření čočky.



## 7 / Pozorně poslouchejte instrukcím aplikace.

Mohou po Vás být požadovány následující pozice:



### Lehce pootevřeno

*Toto znamená ponechat místo přibližně na jeden prst mezi horními a spodními zuby.*



### Zavřeno

*Zuby úplně dokousnuté. Držet skousnuté po celou dobu skenování.*



### Široce otevřeno

*Zuby do široka od sebe.*

***Při kontrole Scanů si dejte záležet. Pokud skeny nespĺňují instrukce, může je jednoduše zhotovit znovu. Po kontrole všech skenů je odešlete, nezapomeňte nechat dostatek času, pro nahrání skenů, před tím než aplikaci zavřete.***



# DentalMonitoring

dental-monitoring.com

The DentalMonitoring app is available in the App Store or Google Play.



DentalMonitoring is a product designed and manufactured by Dental Monitoring SAS, under the DentalMind branding for Healthcare Professionals (HCP). It is also used by patients under the mandatory supervision of Health Care Professional (HCP). DentalMonitoring is designed to assist HCP, registered at DentalMind, in observing remotely intra-oral situations and monitoring orthodontic treatments. DentalMonitoring product is a medical device (in Europe only), registered as such and holding the CE mark. Refer to your HCP and/or the Instructions for Use before use. Products availability, claims and regulatory status may differ across countries depending on local regulations. Contact your local representative for further information. AD\_MON\_BR\_022\_01\_rd\_P\_US\_en